



CooperVision®
Живи ярко




Инструкция по применению
Раствор многофункциональный для контактных линз
Comfort Drops

Rev.1





CooperVision®
Живи ярко

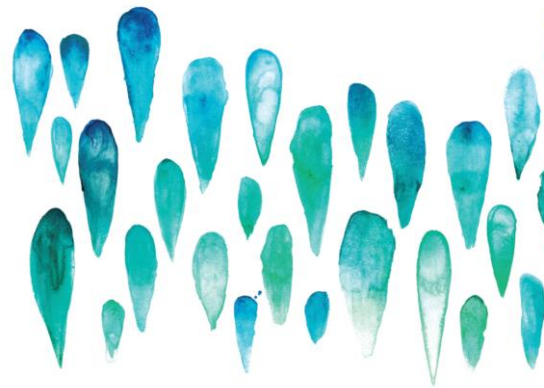

Наименование

Раствор многофункциональный для контактных линз Comfort Drops.

Назначение и описание

Раствор многофункциональный для контактных линз Comfort Drops может быть выписан врачом-офтальмологом или оптометристом для ухода за всеми типами контактных линз.

Раствор многофункциональный для контактных линз Comfort Drops используется для очистки, увлажнения, смазывания и промывания всех типов контактных линз.

Предназначен для личного индивидуального использования с соблюдением инструкции по применению и мер предосторожности.

Не содержит лекарственные средства. Не содержит материалы животного и (или) человеческого происхождения.

Не подлежит повторной стерилизации и дезинфекции.

Показания и противопоказания

Не использовать при индивидуальной непереносимости компонентов раствора.

Возможные побочные эффекты

Аллергические реакции на компоненты раствора.


Предостережения и меры предосторожности

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению перед началом использования изделия.
- Тщательно вымойте и высушите руки перед началом любых манипуляций с контактными линзами.
- Не смешивайте раствор с другими жидкостями.
- Обязательно проконсультируйтесь со специалистом перед применением раствора.
- Не используйте раствор, если защитная пломба повреждена.
- В случае постоянного раздражения глаз, немедленно прекратите использование раствора, извлеките линзу из глаза и проконсультируйтесь со специалистом.
- Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.
- Храните раствор в недоступном для детей месте.
- Не допускайте соприкосновения наконечника флакона с любыми поверхностями.
- Плотно закрывайте крышку флакона после каждого использования.
- Не промывайте контактные линзы или контейнер для хранения контактных линз в проточной воде.





CooperVision®
Живи ярко

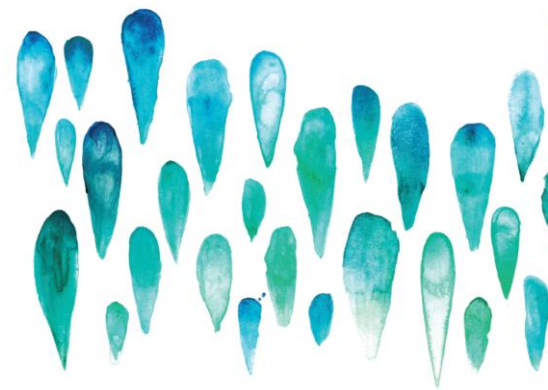

- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на упаковке.
- Не меняйте раствор без рекомендации специалиста.
- Не глотайте раствор.

Способ применения:

Тщательно вымойте и высушите руки перед началом любых манипуляций с контактными линзами. Откройте колпачок. Запрокиньте голову назад. Закапайте 1-2 капли раствора в глаз (1 или 2 раза в день – по мере необходимости).

Состав раствора и материалы упаковки

Раствор: полиаминопропил бигуанид; динатриевая соль ЭДТУ; безводный динатрий фосфат; дигидрат моносодийфосфата; блок-сополимер этиленоксида и пропиленоксида; натрия хлорид; модифицированная целлюлоза; вода очищенная.

Бутылка, колпачок с защитой от вскрытия: полиэтилен высокой плотности.

Наконечник: полиэтилен низкой плотности.

Технические характеристики раствора

Цвет	Прозрачный, бесцветный раствор
Запах	Без запаха
Осмоляльность*, мОсм/кг	270-330
рН при 20°C*	6,8 -7,2

Стерильность

Раствор стерилизован методом фильтрации через стерильный антибактериальный мембранный фильтр и методом асептического розлива в стерильные флаконы (пар, автоклавирование).


Первичная упаковка, включая все ее комплектующие, стерилизуется радиацией.

Уровень стерильности (SAL) для этого изделия - 10^{-3} или выше.

Хранение, транспортировка и срок годности


Раствор необходимо хранить при температуре от 4° до 25°C.

Раствор можно перевозить при температуре от 4° до 25°C любыми видами крытых транспортных средств.

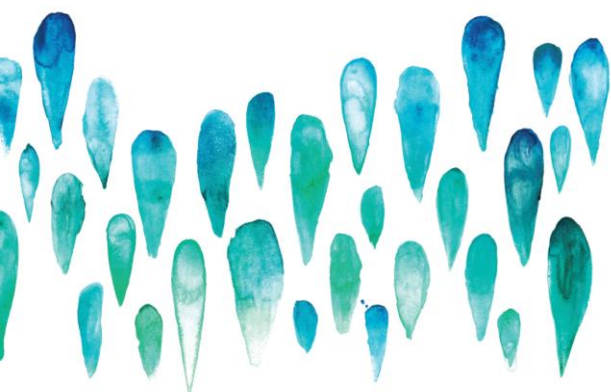



CooperVision®
Живи ярко

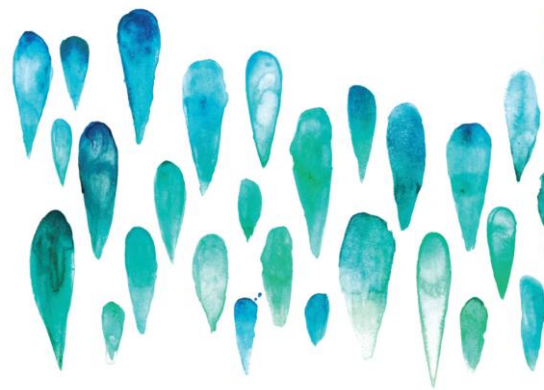

Кратковременные отклонения от указанных интервалов температур не оказывают значительного эффекта на стабильность изделия.

Целостность упаковки сохраняется при обычных процедурах погрузки и транспортировки, сохраняя стерильность изделия.

Срок годности раствора составляет 3 года с даты производства. Дата производства и дата истечения срока годности указаны на упаковке. Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.

Влияние на окружающую среду

Изделие при правильном использовании, транспортировке, хранении и утилизации не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

Утилизация

Отходы от применения раствора должны утилизироваться в соответствии с любыми применимыми локальными/национальными стандартами по утилизации отходов.

класс опасности:

18 01 04– безопасные отходы, для которых не требуется специальная система сбора и утилизации с точки зрения предотвращения распространения инфекций.

Соответствие стандартам

BS EN ISO 13485:2012	BS EN ISO 14971:2012	BS EN ISO 11978:2014
BS EN 15223-1: 2012	BS EN ISO 14644-1:1999	BS EN ISO 14644-2:2000
BS EN 556-2:2015	BS EN ISO 14730:2014	BS EN ISO 14729:2001/A1:2010
ISO 11981:2009	BS EN ISO 13408-1:2015	BS EN ISO 11137-1:2015
BS EN ISO 11137-2:2015	BS EN ISO 10993-1:2009	BS EN ISO 14155:2011
ISO 11980:2012	ISO 13212:2011	

Гарантия и рекламация





CooperVision®

Живи ярко



Производитель гарантирует качество изделия в течение всего срока годности при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Все жалобы на изделие на территории Российской Федерации следует направлять уполномоченному представителю производителя в РФ ООО «КуперВижн РУС» по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, эт. 17, пом. I, ком. № 1707а.

тел: 8-800-200-77-44

e-mail: info@coopervision.com.ru

Информация о производителе и разработчике

CooperVision Manufacturing Ltd.,

South Point, Hamble, Southampton, SO31 4RF, United Kingdom

Информация о местах производства

- CooperVision Manufacturing Ltd., South Point, Hamble, Southampton, SO31 4RF, United Kingdom;
- CooperVision Lens Care Limited, Mace Industrial Estate, Mace Lane, Ashford, Kent TN24 8EP, United Kingdom.

Регистрационное удостоверение: № ФСЗ 2012/11682 от 09.04.2018 года

