

Линзы контактные мягкие корригирующие однодневные с торговым наименованием и товарным знаком 100Z ONE DAY VIEW PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком 3Z Lens 1 day или с торговым наименованием 54% 1 day - Silicone Hydrogel или с торговым наименованием и товарным знаком ACULIFE EXPERT или с торговым наименованием и товарным знаком Airlens 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком AirOptix 1-DAY или с торговым наименованием и товарным знаком AirVium 1 Day PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком Avairium Airway Premium 1 DAY или с торговым наименованием и товарным знаком ASSOL 1 DAY PURE или с торговым наименованием и товарным знаком AT FIRST SIGHT 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком Biolens 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком BioSoft 1-DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком садбелс® deluxe 1 day или с торговым наименованием и товарным знаком SpheroLens 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком CL 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком CLEARSKY 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком cooperflex® SUPER 1 DAY или с торговым наименованием и товарным знаком CRYSTAL LAKES 1 DAY или с торговым наименованием и товарным знаком CrystalLook 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком CrystalView 1 Day etic или с торговым наименованием и товарным знаком DEAR LENS 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком DINAUYE PRO 1 Day или с торговым наименованием DL One Day Premium или с торговым наименованием ExCel lens 1 Day или с торговым наименованием и товарным знаком EyeJoy 1 day PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком EyeContact 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком FLEXVIEW 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком free eyes one day for me или с торговым наименованием и товарным знаком FreeView 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком hario 1 day premium или с торговым наименованием и товарным знаком HIGH TIME 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком HYDRAVIEW 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком iWear hantou или с торговым наименованием и товарным знаком Just to see 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком LET IT SEE 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком Likont 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком Lunelle 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком medicare® more 1 DAY или с торговым наименованием и товарным знаком morejoy 1 day premium или с торговым наименованием и товарным знаком MyDay® daily disposable или с торговым наименованием и товарным знаком MyLens 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком MySight® или с торговым наименованием и товарным знаком NiceDay 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком NiceEye 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком NNC 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком Novales 1-DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком OCHKOV.NET 1-Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком Onelens 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком ONEVIEW PREMIUM 1 - day или с торговым наименованием и товарным знаком оптик® premium или с торговым наименованием и товарным знаком OPTITOUCH 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком OptWay 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком OXGENEILL 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком OXY 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком perfect 1 day premium или с торговым наименованием и товарным знаком POINT OF VIEW 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком PrimaView 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком PrizmaBio One day или с торговым наименованием и товарным знаком ProAir 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком PURE LOOK 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком PURE ONE 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием PureWay 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком Rhythmic® Ultimate 1 DAY или с торговым наименованием и товарным знаком SANCYLOOK 1 DAY или с торговым наименованием и товарным знаком SECOND SIGHT 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием SIGHT CARE 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком SILVER® ONCE 1 DAY или с торговым наименованием и товарным знаком Spectra 1 day PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком 54% 1 day silicone hydrogel или с торговым наименованием и товарным знаком ultraflex® opti 1 DAY или с торговым наименованием и товарным знаком UltraView 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком VetaComfort 1 day или с торговым наименованием и товарным знаком VEWARE 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком VISIBLE EXCITE или с торговым наименованием VISOSENS 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком YASNO 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком ZOLO 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием Клио 1 Day Premium или с торговым наименованием Линз-Очки На день или с торговым наименованием и товарным знаком OKTOPIX 1 Day или с торговым наименованием и товарным знаком ТОЧНАЯ ОПТИКА 1 день. Прочими или с торговым наименованием и товарным знаком OptWay 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком OXGENEILL 1 DAY Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel 3Z lens 1 day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel ACULIFE EXPERT или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel AirOptix 1-DAY или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel AirVium 1 Day PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel Avairium Premium 1 DAY или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel ASSOL 1 DAY PURE или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel AT FIRST SIGHT 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel Biolens 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel BioSoft 1-DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel садбелс® deluxe 1 day или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel SpheroLens 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel CLEARSKY 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel cooperflex® SUPER 1 DAY или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel CRYSTAL LAKES 1 DAY или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel CrystalLook 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel CrystalView 1 Day etic или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel DEAR LENS 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel DINAUYE PRO 1 Day или с торговым наименованием stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel DL One Day Premium или с торговым наименованием stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel ExCel lens 1 Day или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel EyeJoy 1 day PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel EyeContact 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel FLEXVIEW 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel FLEXVIEW 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel FLEXVIEW 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel FreeView 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel HIGH TIME 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel HYDRAVIEW 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel iWear hantou или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel Just to see 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel Lunelle 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel medicare® more 1 DAY или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel morejoy 1 day premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel MyDay® daily disposable или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel MySight® или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel NiceDay 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel NiceEye 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel NNC 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel Novales 1-DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel OCHKOV.NET 1-Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel Onelens 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel ONEVIEW PREMIUM 1 - day или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel оптик® premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel OPTITOUCH 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel OptWay 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel OXGENEILL 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel OXY 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel perfect 1 day premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel POINT OF VIEW 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel PrimaView 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel PrizmaBio One day или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel PureLook 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel PureWay 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel Rhythmic® Ultimate 1 DAY или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel SANCYLOOK 1 DAY или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel SECOND SIGHT 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel SIGHT CARE 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel SILVER® ONCE 1 DAY или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel Spectra 1 day PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel ultraflex® opti 1 DAY или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel UltraView 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel VetaComfort 1 day или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel VEWARE 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel VISIBLE EXCITE или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel VISOSENS 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel YASNO 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel ZOLO 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel Клио 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel ТОЧНАЯ ОПТИКА 1 день. Премью – это асферические контактные линзы с манипуляционным окрашиванием и УФ-фильтром.

rev. 1.6

P101247 Rev. A

Страница 1 из 8

stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel free eyes one day for me или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel FreeView 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel hario 1 day premium или с торговым наименованием stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel HIGH TIME 1 Day PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel HYDRAVIEW 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel iWear hantou или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel Just to see 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel Lunelle 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel Lunelent 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel medicare® more 1 DAY или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel morejoy 1 day premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel MyDay® daily disposable или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel MySight® или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel NiceDay 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel NiceEye 1 day PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel NNC 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel Novales 1-DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel OCHKOV.NET 1-Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel Onelens 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel ONEVIEW PREMIUM 1 - day или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel оптик® premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel OPTITOUCH 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel OptWay 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel OXGENEILL 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel OXY 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel perfect 1 day premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel POINT OF VIEW 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel PrimaView 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel PrizmaBio One day или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel PureLook 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel PureWay 1 Day Premium или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel Rhythmic® Ultimate 1 DAY или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel SANCYLOOK 1 day или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel SECOND SIGHT 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel SIGHT CARE 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel SILVER® ONCE 1 DAY или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel Spectra 1 day PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel ultraflex® opti 1 DAY или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel VetaComfort 1 day или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel VEWARE 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel VISIBLE EXCITE или с торговым наименованием stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel VISOSENS 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel YASNO 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel ZOLO 1 DAY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel Клио 1 Day Premium или с торговым наименованием stenticon A 54% 1 day silicone hydrogel ТОЧНАЯ ОПТИКА 1 день. Премью – это асферические контактные линзы с манипуляционным окрашиванием и УФ-фильтром.

Линзы произведены из силикон-гидрогелевого материала стентификон А с влагосодержанием 54%, который характеризуется высокой кислородопроницаемостью (Dk).

Линзы контактные мягкие показаны для коррекции аметропии (миопии или гиперметропии) у людей с афактическим и нефактическим зрением и здоровыми глазами. Линзы пригодны для ношения людьми с астigmatизмом, не превышающим 2,00 диоптрий, который не влияет на остроту зрения.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	2a
Тип и длительность контакта с организмом человека	Кратковременный контакт (менее 24 часов) со слизистыми
Изделие	Инкапсулированное
Стерильность	Стерильно (стерилизация паром)
Интертирование	Не применимо
Область применения	Офтальмология
Длительность эксплуатации	Дневное ношение (менее 12 часов) в состоянии бодрствования
Условия применения	Индивидуальное использование в домашних условиях
Кратность применения	Одноразовое использование
Возможность коррекции дефектов зрения	Стигматические
Число оптических зон коррекции	Однофокальные

rev. 1.6

P101247 Rev. A

Страница 2 из 8

Срок годности 7 лет

Линзы не содержат в своем составе лекарственных средств и материалов животного/человеческого происхождения.

Линзы не подлежат повторной стерилизации и дезинфекции.

#### Комплект поставки

Линзы контактные мягкие корригирующие однодневные всех торговых наименований и/или товарных знаков, за исключением Линз контактных мягких корригирующих однодневных с торговым наименованием 54% 1 day - Silicone Hydrogel, поставляются в картонных коробках (торговых упаковках) из 30 или 90 блистеров.

Блистеры располагаются в ряд из 5 штук по 6 или 18 ячеек в каждой упаковке.

В вертикальной упаковке (блистеры) – фторполимерный раствор, содержащий линзы, упаковочный раствор.

Количество линз указано на боковой и/или оборотной стороне картонной коробки.

Количество линз указано на боковой и/или оборотной стороне картонной коробки.

Дополнительно информация о количестве линз в упаковке может быть размещена на лицевой стороне картонной коробки.

Линзы контактные мягкие корригирующие однодневные с торговым наименованием 54% 1 day - Silicone Hydrogel поставляются в картонных коробках из 5 блистеров.

Блистеры располагаются в ряд из 5 штук в каждой упаковке.

В вертикальной упаковке (блистер) находится 1 линза с фосфатно-солевым упаковочным раствором.

Количество линз указано на боковой и/или оборотной стороне картонной коробки.

Инструкция по применению линз размещена на сайте [www.cooperlenses.com](http://www.cooperlenses.com).

К картин линз, направляемых в один адрес, прилагается инструкция по применению в количестве одного экземпляра. Под партией понимаются линзы, отправляемые одновременно в адрес одного грузополучателя.

ВНИМАНИЕ! Первичная стерильная упаковка (блистер) не является розничной упаковкой и не подлежит продаже без картонной коробки, которая является потребителем тарой.

НЕ пользоваться контактными линзами, если возникло любое из следующих обстоятельств:

- Острые или затухающие инфекции или воспаления передней камеры глаза,
- Глазные болезни, повреждения или иные аномалии, которые влияют на состояние роговицы, конъюнктивы или век,
- Недостаточное секретиция глаз (синдром «сухого глаза»),
- Наличие язвочки (слизистая чувствительности роговицы), если она не вызвана афакцией,
- Любые типы системных болезней, которые могут повлиять на состояние глаз или состояние которых может быть ухудшено от ношения мягких контактных линз,
- Аллергические реакции глаза или области вокруг глаз, которые могут быть вызваны ношением контактных линз,
- Любые инфекции роговицы в активной форме (бактериальные, грибковые и иные),
- Раздражение или повреждение глаз,
- Состояние пациента, при котором он не может обращаться с контактными линзами или не имеет возможности получить помощь при обращении с линзами.

При ношении мягких контактных линз могут возникнуть следующие проблемы:

- Чувство жжения, покалывания или иной тип боли,
- Возможное снижение комфорта после первоначального надевания в односторонний период ношения линзы,
- Ощущение инородного тела в глазу или покраснения роговицы,
- Увеличение секреции глаза (слишком обильное слезотечение),
- Покраснение глаз,
- «Затуманненность» зрения, появление радужных кругов или ореолов вокруг объектов, светобоязи (фотофобия),
- Сухость глаз.

Если пациент заметил любое состояние из вышеперечисленного, необходимо:

- Немедленно снять линзы.
- Если дискомфорт или возникшая проблема исчезли, тщательно изучить линзу.
- Если проблема продолжается, немедленно снимите линзу и свяжитесь со своим офтальмологом / оптометристом.

Своевременное лечение может предотвратить серьезные повреждения глаза. Несоблюдение рекомендаций врача увеличивает риск развития язвенного кератита.

#### Предостережения:

- НЕ спите в линзах, если у вас нет специальной рекомендации вашего офтальмолога.
- НЕ носите линзы дольше срока, рекомендованного врачом-офтальмологом/оптометристом.
- НЕ используйте продукты бытовой химии (например, дезинфицирующие средства) для ухода за линзами (применямо для линз дневного ношения).
- НЕ носите контактные линзы при использовании глазных капель (если у вас нет специальной рекомендации по закапыванию капель от вашего офтальмолога).
- НЕ используйте слюну для увлажнения контактных линз.
- НЕ промывайте линзы водопроводной водой.
- НЕ используйте ваши линзы совместно с другими людьми.
- НЕ используйте линзы, если стерильная блистерная упаковка открыта или повреждена.
- НЕ используйте контактные линзы с истекшим сроком годности.

#### Меры предосторожности:

- Всегда мойте руки перед началом манипуляций с линзами.
- Избегайте попадания на линзы и глаза косметических средств, лосьонов, аэрозолей и других веществ или вредных испарений.
- Рекомендуется надевать линзы до нанесения макияжа.

- Не проводите манипуляции с линзами при наличии в руках других предметов: линза может быть повреждена.
- Точно следуйте рекомендациям по извлечению линзы из упаковки, надеванию и снятию линз, указанным в инструкции или данных специалистом.
- Не переносите линзы.
- Не используйте линзы или иные инструменты для извлечения линзы из блистера, за исключением инструментов, специально для этого предназначенных.
- Всегда консультируйтесь с врачом до начала использования изделия.
- Проинформируйте работодателя о ношении контактных линз. Некоторые типы работы требуют использования средств защиты для глаз или требуют избегать ношения контактных линз во время работы.
- Избегайте длительных поездок. Они являются источником накопления биостерильных микроорганизмов.
- При зрительных возмущениях зрения или плавающих зрачков замените линзы новой парой немедленно после окончания занятий. Связавшиеся в воде микроорганизмы могут привести к инфекциям, вызванным линзами или слезоте.

#### Информация по применению

##### Указания

Линзы контактные мягкие корригирующие однодневные используются для дневного одноразового ношения и должны быть утилизированы сразу же извлечения из глаз. Повторная очистка и дезинфекция запрещены.

Необходимо следовать следующим указаниям по уходу и применению контактных линз:

- Всегда мойте и вытирайте руки перед началом манипуляций с контактными линзами.
- Не используйте слюну или другие жидкости для смывки или повторного увлажнения линзы.
- Упаковка линз должна иметь запасную пару линз.

Крайне важно соблюдать следующие процедуры при манипуляциях с контактными линзами:

- Всегда тщательно мойте руки нейтральным мылом (рН приближен к 7), тщательно его смывайте и вытирайте руки безворсовым полотенцем.
- Не используйте мыло, содержащее увлажняющие крем, лосьон или масла. Эти вещества могут попасть на линзу и вызвать дискомфорт.
- Проводите манипуляции с линзой кончиками пальцев. Будьте осторожны при касании линзы ногтями.

##### ЕСЛИ ЛИНЗА ВЫСОХЛА

Если по какой-либо причине линза находилась на воздухе (не в глазу или блистере), она высыхает и становится хрупкой. В этом случае не используйте линзу, утилизируйте ее и используйте вместо нее новую.

##### ЕСЛИ ЛИНЗА НЕПОДВИЖНА

Если линза перестала двигаться или не может быть извлечена (пришла к глазу), немедленно замените 2 или 3 капли линзы для смачивания и увлажнения глаз, рекомендованных специалистом и подождите, пока линза не будет свободно двигаться в глазу для ее дальнейшего извлечения. Если линза остается неподвижной более 5 минут, пациенту немедленно необходимо обратиться к специалисту.

##### Примечание

Помните, что при использовании однодневных линз чистка и дезинфекция не требуется, ввиду того что они предназначены для одноразового использования. Линзы следует утилизировать после извлечения из глаз. Всегда имейте при себе запасную пару линз или очки.

##### Режим ношения

Режим ношения линз должен быть определен лечащим врачом или оптометристом. Необходимо избегать перенашивания линз во избежание возникновения возможных проблем и нежелательных реакций. При ношении мягких контактных линз необходимо постоянно находиться под наблюдением специалиста и проводить регулярные осмотры. Режим осмотра определяет лечащий врач или оптометрист.

Максимальное рекомендованное время ношения линзы – менее 12 часов, в состоянии бодрствования.

#### Инструкция по применению

##### Расpackовка линз

Упаковка линз специально разработана для сохранения ее стерильности. Блистер содержит 1 линзу. Для распаковки блистера следуйте следующим указаниям:

- Встряхните блистер и убедитесь, что линза погружена в раствор
- Осторожно отогните фольгу для открытия блистера. Удерживайте блистер на ровной горизонтальной поверхности во избежание разрывания раствора.

При открытии линза может приклеиться к внутренней поверхности фольги или к пластиковой упаковке. Это не влияет на стерильность линзы.

- Осторожно извлеките линзу и осмотрите ее, следуя дальнейшим инструкциям.

##### Обращение с контактными линзами


- Всегда начинайте манипуляции с правой линзы во избежание путаницы.
- Извлеките правую линзу из блистера и убедитесь, что линза увлажнена по всей поверхности, чистая, прозрачная, не имеет отложений. При обнаружении каких-либо дефектов на линзе, не используйте ее. Верните дефектную линзу в контейнер, вместе с другими линзами. Используйте новую линзу.

rev. 1.6

P101247 Rev. A

Страница 4 из 8


- Перед надеванием линзы, убедитесь, что линза находится в правильном положении, не вывернута наизунок. Поместите линзу на указательный палец для определения её формы.
- Если края линзы направлены наружу, значит линза вывернута наизунок (Рис. А и Рис. Б).

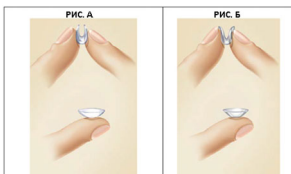

**Надевание контактных линз**

- Разместите линзу на кончике указательного пальца. **УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЛИНЗА ВЫВЕРНУТА ВЕРНО!**
- Оттяните нижнее веко средним пальцем руки, в которой находится линза.
- Используйте средний или указательный палец другой руки чтобы приподнять верхнее веко (Рис. В)
- Разместите линзу на глазу (Рис. Г)
- Повторите указанные манипуляции со вторым глазом.
- Линза самоцентрируется без дополнительных манипуляций.

Если указанный метод надевания линз сложен для выполнения пациентом, необходимо обратиться к специалисту для получения информации по альтернативным методам надевания контактных линз.

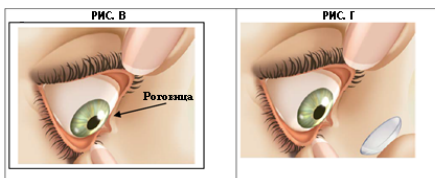

**Примечание**

Если после надевания линзы зрение размыто, возможно возникли следующие проблемы:

- Линза не самоцентрировалась. Пользуйтесь указаниями из пункта «Центрирование линзы»
- На линзе присутствует косметика или масла.
- Линза вывернута неверно

Если зрение все еще размыто обратитесь к специалисту за консультацией.

**Центрирование линзы**

Если возникла необходимость центрировать линзу, выполните одну из следующих процедур:

- Прикройте веки и пальцем переместите линзу в центр маскирующими движениями через закрытые веки.
- ИЛИ
- Осторожно передвиньте децентрированную линзу на роговицу при открытых глазах, надавливая пальцем на край верхнего или нижнего века.

**Снятие контактных линз**

**ВНИМАНИЕ!** Сначала убедитесь, что линза находится на роговице, и линзу затем приступайте к ее снятию.

- Тщательно вымойте руки нейтральным мылом (рН приближен к 7), смойте его и вытрите руки бязевым полотенцем.
- Извлеките правую линзу одним из предложенных ниже способов (Рис. Д и Рис. Е):

**СПОСОБ 1:**

- Посмотрите вверх; сдвиньте линзу к нижней части глаза используя указательный палец руки.
- Аккуратно зажмите линзу между большим и указательным пальцами.
- Уберите линзу.

rev. 1.6

PI01247 Rev. A  
Страница 5 из 8



**СПОСОБ 2:**

- Разместите руку на полотене под глазом для того, чтобы поймать линзу.
- Разместите указательный палец руки на центре верхнего века и большой палец на центре нижнего века.
- Нажмите с усилием на веки и моргните. Линза должна остаться в руке.

- Повторите манипуляции со вторым глазом.
- После извлечения линзы следуйте дальнейшим рекомендациям по уходу за контактными линзами или утилизируйте ее согласно рекомендациям по утилизации.

**Хранение, транспортировка и срок годности**

Линзы необходимо хранить при температуре от 0° до 30°С.

Контактные линзы можно перевозить при температуре от -50°С до 45°С любыми видами крытых транспортных средств.

Кратковременные отклонения от указанных интервалов температур не оказывают значимого эффекта на стабильность изделия.

Целостность упаковки сохраняется при обычных процедурах погрузки и транспортировки, сохраняя стерильность изделия.

Срок годности линз составляет 7 лет с даты производства. Дата истечения срока годности изделия указана на упаковке.

**Техническая информация**

Материал линзы: силикон-гидрогелевый материал стейфилкон А 46% с влажностью 54%.

Первичная упаковка (блистер) выполнена из следующих материалов:

- Блистер: Полипропилен
- Фольга, ламинированная алюминием
- Фосфатно-солевой упаковочный раствор, состоящий из следующих компонентов: Додекагидрат дигидрофосфата натрия; додекагидрат двухосновного фосфата натрия; хлорид натрия; полиоксизэтилен сорбитан моноолеат; поливинилпирролидон; очищенная вода.

Вторичная упаковка выполнена из картона.

**Основные параметры линз**

Основные параметры линзы	Номинальное значение	Предельное отклонение
Общий диаметр $D_{ext}$ , мм (диаметр хорды)	14,2	$\pm 0,20$
Оптический диаметр $D_o$ , мм	7,5-8,0	$\pm 0,20$
Радиус кривизны задней центральной оптической зоны $r_b$ , мм (базовая кривизна)	8,4	$\pm 0,20$
Толщина в геометрическом центре $t_c$ , мм	От 0,060 до 0,272 в зависимости от оптической силы линзы	в зависимости от оптической силы линзы
Задняя вершинная рефракция $F_v$ , диоптр (оптическая сила)	от -12,00 до +8,00	Интервал 0,5 D (в диапазоне от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00D) 0,25 D (в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D).
Кислородная проницаемость (Dk)	$80 \times 10^{-11} \text{ (см}^2\text{/сек)} \times (\text{мл O}_2\text{)/(мл} \times \text{мм рт. ст.)}$	$\pm 20\%$
Коэффициент пропускания кислорода (Dk/t)	От $33 \times 10^{-10}$ до $110 \times 10^{-10}$ в зависимости от толщины линзы в геометрическом центре	$\pm 20\%$

rev. 1.6

PI01247 Rev. A  
Страница 6 из 8

Светопроницаемость	Видимый свет (381 – 780нм)	96%	+4% / -5%
	УФ А (316 – 380нм)	86%	$\pm 5\%$
	УФ В (280 – 315нм)	97%	+3% / -5%
Индекс рефракции		1,401	$\pm 0,005$
Влажностное содержание		54%	$\pm 2\%$
рН упаковочного раствора		7,1-7,7	-
Осмоляльность упаковочного раствора		289 - 339 мОсм/кг	-
Количество упаковочного раствора в блистере		1,3 мл	$\pm 0,20$

**Применяемые стандарты**

BS EN ISO 18369-1:2017	BS EN ISO 11978:2017	ISO 17655-1:2006
BS EN ISO 18369-2:2017	BS EN ISO 10993-5:2009	ISO 17655-2:2006
BS EN ISO 18369-3:2017	BS EN ISO 10993-10:2013	ISO 17655-3:2006
BS EN ISO 18369-4:2017	BS EN ISO 10993-11:2006	BS EN ISO 11987:2012
BS EN ISO 11607-1:2006	BS EN ISO 11737-2:2009	BS EN ISO 14971:2012
BS EN ISO 15223-1:2016	BS EN 556-1:2001	BS EN ISO 13485:2016

**Информация по стерилизации**

Стерилизация линз осуществляется методом паровой стерилизации в автоклаве с системой воздушного баланса. Стерилизация проводится для линз, упакованных в блистер и проводится методом паровой стерилизации с использованием влажного пара (пара) в валидированных автоклавах, выполняющих контроль параметров (уровня стерильности) продукции. При валидации процесса стерилизации был достигнут уровень стерильности изделий (SAL)  $10^{-6}$  и выше.

**Влияние на окружающую среду**

Изделия при правильном использовании, транспортировке, хранении и утилизации не оказывают негативного воздействия на человека и окружающую среду.

**Утилизация**

Отходы, образующиеся при применении контактных линз, не классифицируются как опасные отходы согласно Приложению III Европейской Директивы 91/689/ЕЕС от 12 декабря 1991 г. «Об опасных отходах» в соответствии с перечисленными опасностями H1-N14. С точки зрения эпидемиологической безопасности, отходы классифицируются в соответствии с классификационной системой, документированной в решении Европейской Комиссии от 3 мая 2000 г. №2000/532/ЕЕС:

**класс опасности:**

18 01 04 – безопасные отходы, для которых не требуется специальная система сбора и утилизации с точки зрения предотвращения распространения инфекций (что соответствует классу А медицинских отходов согласно СанПиН 2.1.3.684-21 (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТКО)).

Отходы от применения контактных линз должны утилизироваться в соответствии с любыми применимыми локальными/национальными стандартами по утилизации отходов.

На первичной (блистерной) и вторичной (картонной) упаковках используются следующие символы (по применимости):

Символ	Обозначение
	Изготовитель (производитель)
	Дата изготовления
	изделие соответствует требованиям Европейской Директивы по Медицинским Изделиям 93/42/ЕЕС
	Использовать до (дата истечения срока годности)
	Уникальный идентификатор изделия
	Порядковый номер изделия

rev. 1.6

PI01247 Rev. A  
Страница 7 из 8

	Глобальный номер предмета торговли
	Номер партии или серии
	Стерилизация паром или сухим жаром
	Барьерная система стерильности
	Обратитесь к инструкции по применению
	Обратитесь к инструкции по применению на сайте <a href="http://www.coopervision.ru">www.coopervision.ru</a> для ознакомления с противопоказаниями и мерами предосторожности
	указывает на способность изделия блокировать УФ-излучение
	указывает для какого глаза предназначены линзы и срок их замены
	Не использовать при нарушении целостности упаковки
	Внимание! Согласно федеральному закону США, реализация данного изделия производится только по назначению специалиста
	Медицинское изделие
	Уполномоченный представитель в ЕС
	Не использовать повторно

**Производитель**

CooperVision Manufacturing Limited  
(КуперВижн Мануфакчуринг Лимитед),  
South Point, Hamble, Southampton, SO31 4RF, United Kingdom (Соединенное Королевство)

**Гарантия и рекламация**

Производитель гарантирует качество изделий в течение всего срока годности при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Все жалобы на изделие на территории Российской Федерации следует направлять уполномоченному представителю производителя в РФ ООО «КуперВижн РУС» по адресу:  
Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, эт. 17, пом. 1, ком. № 1707а.  
тел.: 8-800-200-77-44, +7 495 995 80 15  
e-mail: [info@coopervision.com.ru](mailto:info@coopervision.com.ru)

rev. 1.6

PI01247 Rev. A  
Страница 8 из 8