



CooperVision®
Живи ярко



**Инструкция по применению
Средство увлажняющее Comfort Drops**

Rev. 1.1





CooperVision®
Живи ярко



Наименование

Средство увлажняющее Comfort Drops.

Назначение и описание

Средство увлажняющее может быть рекомендовано врачом-офтальмологом или оптометристом для ухода за всеми типами контактных линз.

Средство увлажняющее используется для очистки, увлажнения, смазывания и промывания всех типов контактных линз.

Предназначено для личного индивидуального использования с соблюдением инструкции по применению и мер предосторожности.

Не содержит лекарственные средства. Не содержит материалы животного и (или) человеческого происхождения.

Не подлежит повторной стерилизации и дезинфекции.

Показания и противопоказания

Средство может быть рекомендовано врачом-офтальмологом или оптометристом для ухода за всеми типами контактных линз.

Не использовать при индивидуальной непереносимости компонентов средства.

Возможные побочные эффекты

Аллергические реакции на компоненты средства.

Предостережения и меры предосторожности

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению перед началом использования средства.
- Тщательно вымойте и высушите руки перед началом любых манипуляций с контактными линзами.
- Не смешивайте средство с другими жидкостями.
- Обязательно проконсультируйтесь со специалистом перед применением средства.
- Не меняйте средство без рекомендации специалиста.
- Не используйте средство, если защитная пломба флакона повреждена.
- Не используйте средство по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.
- Не используйте средство по истечении срока годности, указанного на упаковке.





- В случае постоянного раздражения глаз, немедленно прекратите использование средства, извлеките линзу из глаза и проконсультируйтесь со специалистом.
- Храните средство в недоступном для детей месте.
- Не допускайте соприкосновения наконечника флакона с любыми поверхностями.
- Плотно закрывайте крышку флакона после каждого использования.
- Не промывайте контактные линзы или контейнер для хранения контактных линз в проточной воде.
- Не глотайте средство.

Способ применения:

Тщательно вымойте и высушите руки перед началом любых манипуляций с контактными линзами. Откройте колпачок. Запрокиньте голову назад. Закапайте 1-2 капли средства в глаз (1 или 2 раза в день – по мере необходимости).

Состав средства и материалы упаковки

Средство: полиаминопропил бигуанид; динатриевая соль ЭДТА; безводный динатрий фосфат; дигидрат моносодия фосфата; блок-сополимер этиленоксида и пропиленоксида; натрия хлорид; модифицированная целлюлоза; вода очищенная.

Бутылка, колпачок с защитой от вскрытия: полиэтилен высокой плотности.

Наконечник: полиэтилен низкой плотности.

Технические характеристики средства

Цвет	Прозрачный, бесцветный раствор
Запах	Без запаха
рН при 20°C*	6,8 -7,2


*допустимое отклонение ($\pm 10\%$).

Стерильность

Средство стерилизовано методом фильтрации через стерильный антибактериальный мембранный фильтр и методом асептического розлива в стерильные флаконы (пар, автоклавирование).

Первичная упаковка, включая все ее комплектующие, стерилизуется радиацией.

Уровень стерильности (SAL) для этого изделия - 10^{-3} или выше.

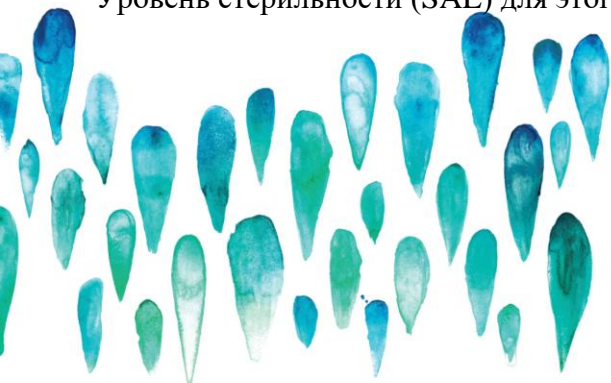



Хранение, транспортировка и срок годности

Средство необходимо хранить при температуре от 4° до 25°С.

Средство можно перевозить при температуре от -18° до 40°С любыми видами крытых транспортных средств.

Кратковременные отклонения от указанных интервалов температур не оказывают значительного эффекта на стабильность изделия.

Целостность упаковки сохраняется при обычных процедурах погрузки и транспортировки, сохраняя стерильность изделия.

Срок годности средства составляет 3 года с даты производства. Дата производства и дата истечения срока годности указаны на упаковке. Не используйте средство по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.

Влияние на окружающую среду

Изделие при правильном использовании, транспортировке, хранении и утилизации не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

Утилизация


Отходы от применения средства должны утилизироваться в соответствии с любыми применимыми локальными/национальными стандартами по утилизации отходов.

класс опасности:

18 01 04 – безопасные отходы, для которых не требуется специальная система сбора и утилизации с точки зрения предотвращения распространения инфекций.

Соответствие стандартам

BS EN ISO 13485:2016	BS EN ISO 14644-2:2000	BS EN ISO 11137-1:2015
BS EN ISO 14971:2012	BS EN 556-2:2015	BS EN ISO 11137-2:2015
BS EN 1041:2008+ A1:2013	BS EN ISO 14730:2014	BS EN ISO 10993-1:2009
BS EN ISO 11978:2014	BS EN ISO 14729:2001/A1:2010	BS EN ISO 14155:2011
BS EN 15223-1:2012	ISO 11981:2009	ISO 11980:2012
BS EN ISO 14644-1:2015	BS EN ISO 13408-1:2015	ISO 13212:2014

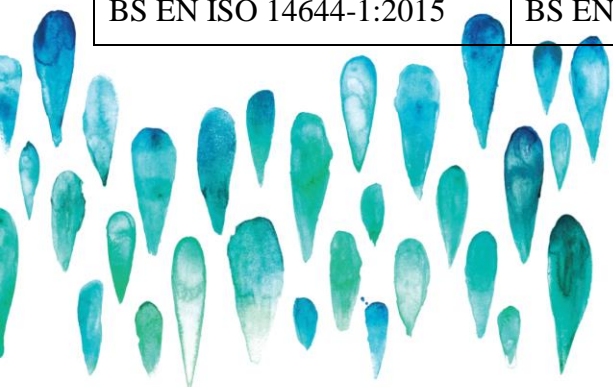



CooperVision®
Живи ярко



Производитель

CooperVision Manufacturing Ltd.,
South Point, Hamble, Southampton, SO31 4RF, United Kingdom.

Гарантия и рекламация

Производитель гарантирует качество изделия в течение всего срока годности при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Все жалобы на изделие на территории Российской Федерации следует направлять ООО «КуперВижн РУС» по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, эт. 17, пом. I, ком. № 1707а.

тел: 8-800-200-77-44

e-mail: info@coopervision.com.ru

Регистрационное удостоверение: № ФСЗ 2012/11682 от 27 ноября 2020 года

