
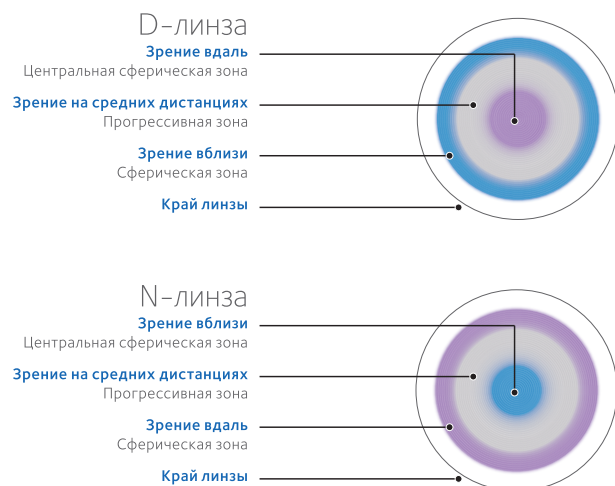


ГИД ПО ПОДБОРУ BIOFINITY MULTIFOCAL

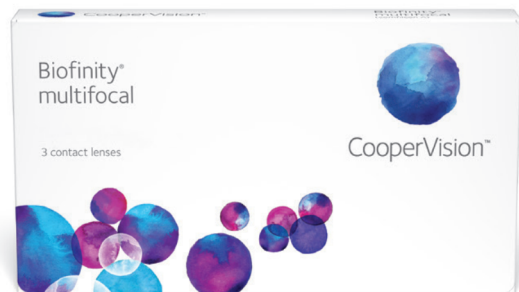

По общей удовлетворенности качеством зрения пациенты оценили линзы Biofinity multifocal как «Превосходно» после одной и двух недель ношения.¹

Biofinity multifocal – мультифокальные контактные линзы, созданные на основе технологий Aquaform® и прогрессивного баланса (Balanced Progressive Technology™), обеспечивают превосходное качество зрения и комфорт в течение всего дня и срока использования линзы.

Преимущества технологии прогрессивного баланса

- Два различных оптических дизайна, D (для дали) и N (для близи), используют адаптивность зрительной коры для улучшения зрения;
- Зоны линзы оптимизированы для каждой диоптрии и аддидации;
- Превосходное зрение на всех расстояниях: вблизи, на средних дистанциях и вдаль;
- Оптимальный подбор любому пациенту.

Преимущества упрощенного подбора мультифокальных линз

- Разработан на основе практического опыта оптометристов всего мира;
- Подбор линз с малой аддидацией стал простым как никогда за счет использования одинаковых D линз на оба глаза;
- Подбор линз с высокой аддидацией остается гибким, позволяя добиваться более высокого качества зрения;
- Понятная в использовании инструкция для успешного подбора пациентам Biofinity multifocal.

Параметры

Материал	Комфилкон А
Влагосодержание	48%
Базовая кривизна	8.6 мм
Диаметр	14.0 мм
Оптическая сила	От +6.00 D до -6.00 D (шаг 0.25 D) От -6.50 D до -10.00 D (шаг 0.50 D)
Аддидация	+1.00, +1.50, +2.00, +2.50
Dk	128
Dk/t	142
Модуль упругости	0.75 мПа
Режим ношения/срока замены	Дневной/1 месяц Пролонгированный (7 дней/6 ночей)/1 месяц
Дизайн	D линза, N линза Закругленные края линзы
Рекомендация по уходу	Химическая или перексидная дезинфекция
Упаковка	3 линзы

Рекомендации

- Проверяйте качество зрения вблизи на реальных объектах, например, экран сотового телефона, печатный текст в книге.
- Используйте минимально возможную аддидацию, нет необходимости в гиперкоррекции аддидации для получения хорошего зрения вблизи.
- Выбирайте максимальную плюсовую линзу для зрения вдаль.
- Проверяйте остроту зрения в условиях хорошей освещенности.
- Специалист по подбору контактных линз может по своему усмотрению изменить алгоритм подбора для достижения наилучшего результата.

Шаги успешного подбора Biofinity multifocal

Первый визит пациента

Шаг 1

Определите рефракцию и доминантный глаз (техника затуманивания).

Шаг 2

Выберите силу сферы по сферозэквиваленту рефракции вдаль, с учетом вертексной поправки. Выберите по таблице дизайн линзы для правого и левого глаза в зависимости от аддидации.

Аддидация	Доминантный глаз	Недоминантный глаз
+1.00	D	D
+1.50	D	D
+2.00	D	N
+2.50	D	N

Шаг 3

Дайте пациенту 15 минут для адаптации к зрению в линзах перед проверкой зрения. Если необходимо улучшить зрение вдаль, добавьте гиперкоррекцию в -0.25 D на доминантный глаз. Если необходимо улучшить зрение вблизи, добавьте гиперкоррекцию в +0.25 D на недоминантный глаз.

Повторный осмотр спустя неделю

Если пациенту требуется улучшение зрения вдаль или вблизи.

Проверьте бинокулярную остроту зрения (зрение двумя глазами).

Проверьте остроту зрения монокулярно (на каждом глазу).

Проведите овер-рефракцию, используя линзу из диагностического набора (не используйте фороптер).

Для улучшения зрения вдаль или вблизи измените рефракцию +/- 0.25 D на глазу, нуждающемся в улучшении зрения.



CooperVision®
Живи ярко